


Par CENOMY  
www.cenomy.fr

## Guide de mise en route rapide Blue2™

**Contact**  
**Cenomy France**  
**Commercial : 03 80 78 42 20**  
**email : info@cenomy.com**

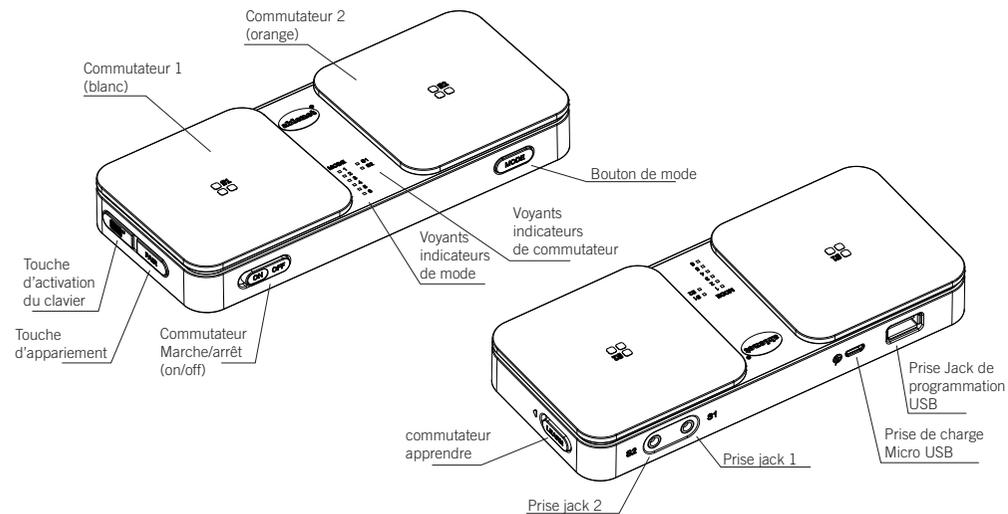

PN 98000035 (08/13 Rev. A)

### Chargement de la batterie

Blue2 est alimenté par une batterie interne rechargeable. Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser Blue2.

Pour le charger :

1. Sélectionnez l'adaptateur mural approprié pour votre région.
2. Insérez la prise USB du chargeur dans le port micro USB de chargement sur le Blue2 et branchez l'adaptateur mural sur une prise murale.
3. Pendant le chargement, les voyants témoins S1 et S2 du commutateur clignotent. La charge finie, les témoins du commutateur restent allumés.

### Configuration

1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt).
2. Actionnez le bouton d'appariement sur le Blue2.
3. Parmi les paramètres Bluetooth® sélectionnez BLUE2.
4. Actionnez le bouton mode sur le Blue2 afin d'en sélectionner un.
5. Réglez tous les paramètres afférents à l'accès au commutateur dans l'application que vous utiliserez sur le périphérique.
6. Blue2 est désormais prêt à être utilisé avec votre périphérique et votre application.

Remarque : Si votre application ne fonctionne pas avec un mode, essayez-en un autre. Si aucun des modes 1, 2 ou 3 ne fonctionne, contactez le concepteur de votre application afin de déterminer quelles frappes ont été utilisées, puis créez un mode personnalisé afin de l'adapter à votre application.

### Utilisation du commutateur

Une fois réglé, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) à utiliser avec une application.

Si vous désirez utiliser un ou deux commutateurs externes avec le Blue2, insérez la fiche de 3,5 mm du commutateur externe dans la prise jack S1 ou prise jack S2. Le commutateur externe contrôlera alors l'application sur votre périphérique.

### Modes d'utilisation

Blue2 est préprogrammé avec trois modes de fonctionnement afin de s'adapter aux protocoles standards utilisés pour l'accès d'un commutateur aux applications. De plus, l'utilisateur peut programmer ses propres séquences de frappe personnalisées sur les modes 4, 5 et 6.

- Mode 1 : Espace et entrée
- Mode 2 : 1 et 3
- Mode 3 : ~1 et ~3
- Mode 4 : Définit par l'utilisateur
- Mode 5 : Définit par l'utilisateur
- Mode 6 : Définit par l'utilisateur

### Mode Veille

Après 30 minutes d'inactivité, le Blue2 passe en mode veille. Pour le réactiver depuis le mode veille, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) et patientez pendant environ 7 secondes afin que le Blue2 se ré-apparie avec votre périphérique.

### Clavier à l'écran

Si vous utilisez un périphérique iOS avec le Blue2, actionner le bouton d'activation du clavier sur le Blue2 affichera le clavier à l'écran. Pour cacher le clavier à l'écran, actionnez le bouton d'activation du clavier une deuxième fois.

### Modes personnalisés

Blue2 vous permet d'enregistrer des séquences clés personnalisées afin de créer un mode personnalisé.

1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt).
2. Insérez un clavier USB à la prise de programmation USB.
3. Placez le commutateur apprendre sur marche en le bougeant vers la gauche.
4. Sélectionnez le mode 4, 5 ou 6
5. Activez le commutateur 1 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S1 clignote pendant l'enregistrement.
6. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 1.
7. Activez le Commutateur 1 pour arrêter le mode d'enregistrement.
8. Activez le Commutateur 2 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S2 clignote pendant l'enregistrement.
9. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 2.
10. Activez le Commutateur 2 pour arrêter le mode d'enregistrement.
11. Placez le commutateur apprendre sur arrêt en le bougeant vers la droite.
12. Retirez le clavier USB.
13. Sélectionnez votre nouveau mode afin de l'utiliser.

### Appariement avec un nouveau périphérique

Si Blue2 a déjà été apparié avec un périphérique, vous devez tout d'abord le désappairer du périphérique avant que celui-ci ne puisse être apparié à nouveau avec un nouveau périphérique. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de vos périphériques, identifiez le périphérique nommé BLUE2, et choisissez d'oublier de périphérique. Vous pouvez désormais suivre la procédure de réglage du Blue2 afin de l'appairer avec le nouveau périphérique.

**Remarque :** Cet appareil a été testé et a été jugé conforme aux limites imposées pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été fixées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de supprimer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- éloignez davantage l'équipement du récepteur ;
- consultez le service d'assistance technique d'AbleNet ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

#### **Informations supplémentaires**

Pour les options de fixation, allez sur le site [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles à [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
1-800-322-0956  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)